

Näin purat mittaustuloksesi OneTouch® Diabeteksenhallintaohjelmiston (OTDMS) avulla

Seuraavien ohjeiden avulla purat mittaustuloksesi nopeasti ja helposti.

Mikäli Sinulla on kysyttävää ota yhteyttä LifeScanin asiakaspalveluun sähköpostilla asiakaspalvelu@lifescan.fi tai soittamalla ilmaiseen asiakaspalvelunumeroomme **0800 122 322**.

Seuraa ohjeita:

Jos käytössäsi on jo OTDMS-ohjelma, Sinun tarvitsee vain päivittää mittarisi ajuri. Mene suoraan kohtaan 3 "Asenna mittarisi ajuri".

- **OTDMS ohjelma v 2.3.2 yhteensopiva myös Vista-käyttäjärjestelmän kanssa** (Tilaa OTDMS-ohjelman CD-ROM asiakaspalvelusta tai lataa ohjelma sivuiltamme www.lifescan.fi)
- **USB-kaapeli** (Tilaa kaapeli asiakaspalvelustamme)
- **OneTouch® kaapelin ajuri v2.0** (Tilaa ajurin CD-ROM asiakaspalvelustamme tai lataa se sivuiltamme www.lifescan.fi)
- **Mittarin ajuri OneTouch® Software v 1.4** (Tilaa ajurin CD-ROM asiakaspalvelustamme tai lataa ajuri sivuiltamme www.lifescan.fi)

Varmista että käytössäsi on OneTouch® Diabeteksenhallintaohjelmiston versio 2.2 tai uudempi ennen kuin aloitat mittarisi ajurin asennuksen.

Näin pääset alkuun:

1. Asenna ohjelma, OTDMS v 2.3.2.
2. Asenna USB-kaapelin ajuri (OneTouch® Cable Driver v2.0) **ennen kuin liität kaapelin tietokoneeseesi.**
3. Asenna mittarin ajuri.
4. Nyt olet valmis purkamaan mittaustuloksesi mittarisi muistista!

Onnea uuden mittarisi johdosta!

Parhain terveisin,

LifeScanin asiakaspalvelu

OneTouch® Diabeteksen- hallintaohjelmisto - Miten pääset alkuun



LifeScanin asiakaspalvelu
Puhelin: **0800 122 322**
(arkisin klo 9-17)
asiakaspalvelu@lifescan.fi
www.lifescan.fi